



# Tribos 501

“ La complexité du relief de nos dents est liée à la Molaire „Tribosphenischen“ en des temps très lointains.  
Résultat d’une Histoire remontant à des millions d’années.

Les Tribos 501, portrait parfait où forme, fonction et esthétique naissent de la Nature,  
prenant tous les éléments scientifiques de la Dent en considération.

Cette hypothèse est essentielle et indispensable pour une occlusion Naturelle ainsi que la fonction  
correcte de l’ensemble de nos organes masticateurs.


” Ottmar Kullmer, institut de recherche Senkenberg Francfort



*Taung-Kind : Reconstitution d'une  
dent âgée de 2 millions d'années*



*Vue d'une  
molaire inférieure*

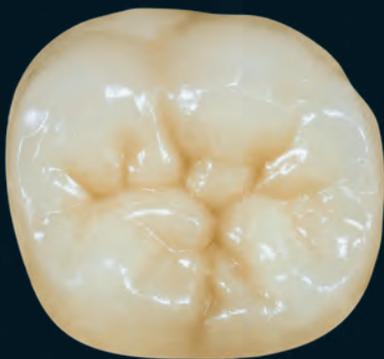

**Tribos 501**  
NFP by Dieter Schulz

La morphologie des dents Tribos 501 est issue  
de la compétence et expérience professionnelle  
de Dieter Schulz


et de la théorie NFP

“Enregistrement Prothétique Fonctionnel et Naturel”  
résultant de 3 Etudes Morphologiques.

**Morphologie Primaire**

**Morphologie Secondaire**

**Morphologie Secondaire Abrasive**

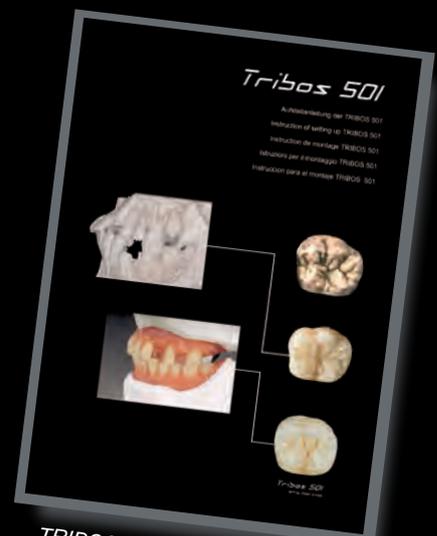

TRIBOS Instruction de montage

# Tribos 501

Les Tribos 501 sont fabriquées à base de PMMA 3 couches au micro, remplissage selon une méthode de condensation récente " Mega-Press-Injection " optimisant compacité et dureté superficielles.

La conséquence est une longévité accrue ainsi qu'un grand confort pour le patient qui apprécie dès le premier contact la précision des Tribos 501.



Afin que vous puissiez mettre en pratique la théorie NFP, nous avons incorporé à la gamme Tribos 501 des „cartes de formes vivantes“ que vous composez à votre gré. Les plaquettes sont également disponible à l'unité.

International :



Gebdi Dental Products GmbH ; Industriestrasse 3A ; 78234 Engen - Allemagne

Tél.: +49-7733-941069 ; Fax: +49-7733-6434 ; e-mail: [info@gebdi-dental.com](mailto:info@gebdi-dental.com) , [www.gebdi-dental.com](http://www.gebdi-dental.com)

France :

André Collet ; 1 avenue Marcelin Berthelot ; F-38100 Grenoble

Tél / Fax: 04 76 85 02 30 ; Mobile: 06 81 86 25 89 ; e-mail: [andré.collet@wanadoo.fr](mailto:andré.collet@wanadoo.fr)

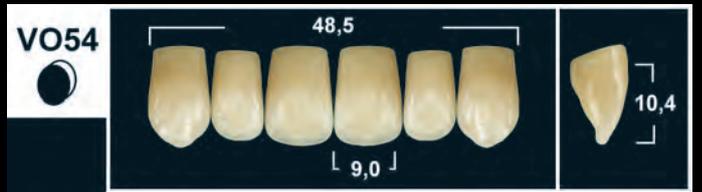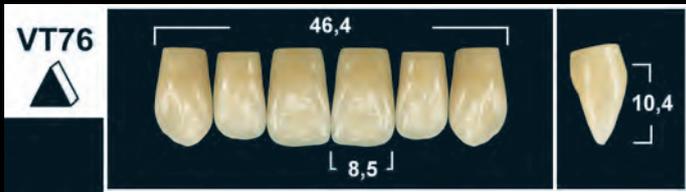

# Morphologie Primaire - Morphologie Secondaire - Morphologie Secondaire Abrasée

## Morphologie primaire



La Morphologie Primaire (PMoyenne/PSmall) correspond à la morphologie d'une dent jeune n'ayant aucune abrasion et de ce fait aucune surface de contact. Le pied de cette Tribos est plein. Sa hauteur est exploitable autorise l'utilisation des Tribos 501 sur Implants.

Table de montage 140

Sagittale

Inclinaison du guidage condylien


(SKN) FH 45° - CE 30°

Angle de Bennet 10°

ISS (mouvement de latéralité) 0,5 mm

Latérotusion LRT -20°

Rétrusion RT 0,5 mm

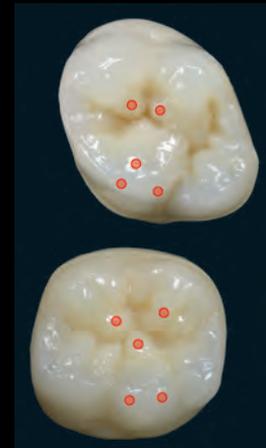

## Morphologie Secondaire



La morphologie Secondaire (SMoyenne/SSmall) correspond à la morphologie d'une dent présentant déjà quelques facettes d'abrasion et de ce fait, quelques surfaces de contact.

Le pied est réduit permettant son utilisation dans les cas d'un léger manque de place.

Table de montage 140

Sagittale

Inclinaison du guidage condylien SKN

FH 30° - CE 15°

Angle de Bennet 10°

ISS (mouvement de Latéralité) 1,0mm

Latérotusion LRT -20°

Rétrusion RT 1,0 mm




## Morphologie Secondaire Abrasée



La Morphologie Secondaire Abrasée (SLargeA/SMoyenneA/SSmallA) correspond à la morphologie d'une dent présentant de multiples facettes d'abrasion et de ce fait, de multiples surfaces de contact. Le pied en forme de tunnel réduit de 70 à 80% le travail de correction pour son adaptation aux crêtes. Cette Tribos 501 est destinée à tout type de restauration prothétique.



Calotte 140  
Sagittale  
Inclinaison du guidage condylien (SKN) FH 25° - CE 10°  
Angle de Bennet 15°  
ISS (mouvement de latéralité) 1,5 mm  
Latérotusion LRT -20°  
Rétrusion RT 1,0 mm

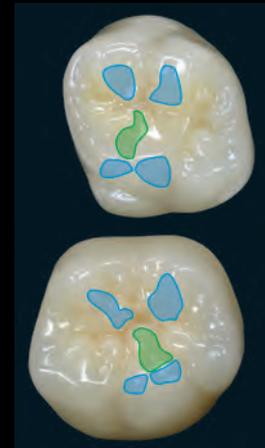

# Tribos 501 c

## Morphologie Secondaire Abrasée ( composite )



Les dents Tribos 501 ont une résistance:

- supérieure aux dents en PMMA (ca. 30%)
- exceptionnelle à l'abrasion
- à la pression avec une haute limite de rupture



**Nous vous recommandons les combinaisons suivant:**

Antérieures		Postérieures		
Supérieures	Inférieures	Morphologie Primaire	Morphologie Secondaire	Morphologie Secondaire Abrasée
T 66	L 5, LV3	PS (small)	SS (small)	SSA (small), SMA (medium)
T 76	L 7, LV 7	PS (small)	SS (small)	SSA (small), SMA (medium)
R 14	L 5, LV 2	PM (medium)	SM (medium)	SMA (medium)
R 66	L 5, LV 2, LV 7	PS (small)	SS (small)	SSA (small), SMA (medium)
O 31	L 3, LV 1	PS (small)	SS (small)	SSA (small), SMA (medium)
VR 11	LV 1, L 3, L 5	PS (small)	SS (small)	SSA (small)
VR 16	LV 1, LV 3, L 5	PS (small)	SS (small)	SSA (small), SMA (medium)
VT 22	LV 2, LV 7, L 7	PM (medium)	SM (medium)	SMA (medium)
VO 37	LV 6, LV 8	PM (medium)	SM (medium)	SLA (large)
VR 43	LV 6, LV 8	PM (medium)	SM (medium)	SMA (medium), SLA (large)
VR 14	LV 2, LV 7	PM (medium)	SM (medium)	SMA (medium), SLA (large)
VR 65	LV 2, LV 7, L 7	PM (medium)	SM (medium)	SMA (medium)
VR 66	LV 2, LV 6	PM (medium)	SM (medium)	SMA (medium), SLA (large)
VT 24	LV 2, LV 7	PM (medium)	SM (medium)	SMA (medium)
VT 76	LV 2, LV 7	PM (medium)	SM (medium)	SMA (medium)
VO 54	LV 2, LV 8	PM (medium)	SM (medium)	SMA (medium), SLA (large)

Ces correspondances ne sont données qu'à titre indicatif.

( L = Large - M = medium - S = Small - V = Volumineuse - T = Triangulaire - R = Rectangulaire - O = Oval )

Disponible dans les couleurs A1 à D4. Correspondant aux couleurs Vita.

Ainsi que dans BL3 = Bleach ( Antérieures, Postérieures en SM et SS )!



Réalisation de Jan Schünemann





gebdi Dental-Products GmbH · Industriestraße 3a · D-78234 Engen · Germany

Telefon: ++49-7733-941016 · Fax: ++049-7733-6434  
www.gebdi-dental.com · e-mail: info@gebdi-dental.com